




操作方法を
動画でチェック



〈アキュチェックガイド Link のペアリング方法〉


以下の手順で、血糖自己測定器 アキュチェックガイド Link と ミニメド™ 770G インスリンポンプ をペアリングしてください。

1 アキュチェックガイド Link の **OK** ボタンを押し、測定器をオンにします。




電源/OKボタン


2 設定を選択します。




3 無線を選択します。

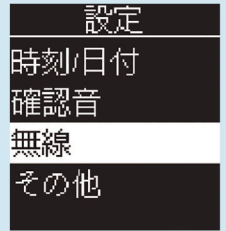

4 確認画面が表示されたら、はいを選択します。

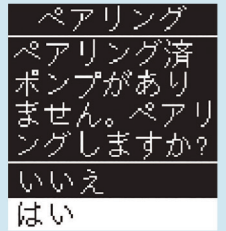

アキュチェックガイド Link のシリアル番号が画面に表示されます。




ペアリングポンプの測定器を選択:
Meter 02929078


シリアル番号は測定器毎に異なります。

これで測定器の準備が完了しました。
続いてポンプを操作します。


5 ポンプの◎ボタンを押し、オプション→ユーティリティ→接続機器オプション→機器のペアリングの順に選択します。

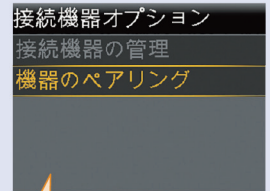


6 検索を選択します。

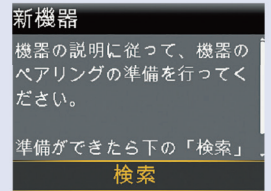


7 アキュチェックガイド Link の画面に表示されたシリアル番号と一致する測定器を選択します。



8 ポンプに表示されているシリアル番号とアキュチェックガイド Link の画面のものが一致したら、確認を選択します。

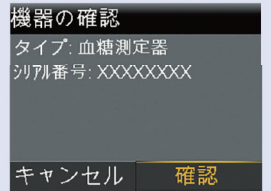

ポンプに「ペアリング成功」のメッセージが表示されます。アキュチェックガイド Link の画面に、「ペアリング完了」のメッセージと「ポンプのシリアル番号」が表示されれば完了です。



◎ ボタン

- ホーム画面で◎を押すとメニューが表示されます。
- ◎で選択したメニューを確定します



アキュチェックガイド Link およびアキュチェックガイドストリップに関するお問い合わせ

ロシュDCジャパン株式会社 「ロシュにハロー お客様センター」へ 24時間365日 ☎ **0120-642-860**

フリーダイヤル ロシュに ハロー

使用済みの試験紙やランセットの廃棄方法については、お住まいの地区の自治体または各医療機関等にお問い合わせください。

*添付文書または電子添文と取扱説明書を必ずお読みください。

ミニメド770Gインスリンポンプに関するお問い合わせは日本メドトロニック24時間サポートラインへ 0120-56-32-56(24時間365日)



操作方法を
動画でチェック

〈アキュチェックガイド Link 血糖測定結果のポンプへの送信方法〉

以下の手順で、血糖測定結果をインスリンポンプに送信します。必要に応じ、較正またはボーラスを行ってください。


- 1 血糖値を測定後、「戻るボタン」を押し、血糖測定結果をポンプに送信します。



9:38am 12/11/16
106 mg/dL
フラグの追加
7:38am 85mg/dL

アキュチェックガイド Link を用いて血糖値を測定した後に、「フラグの追加」を選択すると測定タイミングなどの情報を追加することができます。フラグを追加した後、「戻るボタン」を押すと血糖測定値がポンプに転送されます。

- 2 ポンプ画面に血糖測定結果が表示されます。「はい」を選択し、血糖値を確定します。血糖値が正確でないと考えられる場合は、ここで値を確定しないでください。「いいえ」を選択し、手を流水でよく洗い乾かしてから再度血糖値を測定してください。

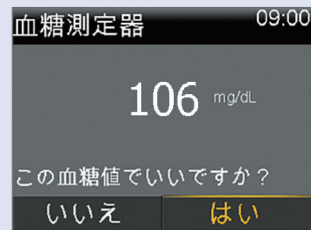

転送された血糖測定値を表示するにはポンプをホーム画面にしてください。

- 3 センサ較正を行う場合は、「センサ較正」を選択します。



- 4 ボーラスを行う場合は、「ボーラス」を選択します。どちらも行わない場合は「完了」を選択します。



送信した血糖値が反映されます

ボーラスウィザード例

血糖	106 mg/dL	0.4U
残存インスリン調整		-0.3U
糖質	0g	0.0U
ボーラス		0.1U

次へ

適切に血糖自己測定を行うために

適切に血糖自己測定を行いましょう。較正は正しい値で実施することが重要です。

- 適切な測定部位であるか確認しましょう
- 測定部位が十分に乾いているか確認しましょう
- 測定時に無理に血液を押し出したりしないようにしましょう
- 測定に使用する試験紙の有効期限が切れていないか確認しましょう
- 測定時の血液量が少なくないか確認しましょう
- SAP をお使いの方は、較正のポイントも確認しましょう

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文、添付文書および取扱説明書をご参照ください。

[アキュチェックガイドLink] 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 / 認証番号: 302AABZX00094000
 [アキュチェックガイドストリップ] 体外診断用医薬品 / 承認番号: 22900EZ00001000
 [メドトロニック ミニメド 700シリーズ] 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 / 承認番号: 30300BZX00256000

アキュチェックWebサイト <http://www.accu-chek.jp/>

ACCU-CHEK、ACCU-CHEK GUIDE およびアキュチェックは Roche の商標です。メドトロニックは、Medtronic の商標です。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Roche is under license. All other product names and trademarks are the property of their respective owners.

©2022 Roche DC Japan K.K.09.0000.GUY.A